


Komponentenkarte

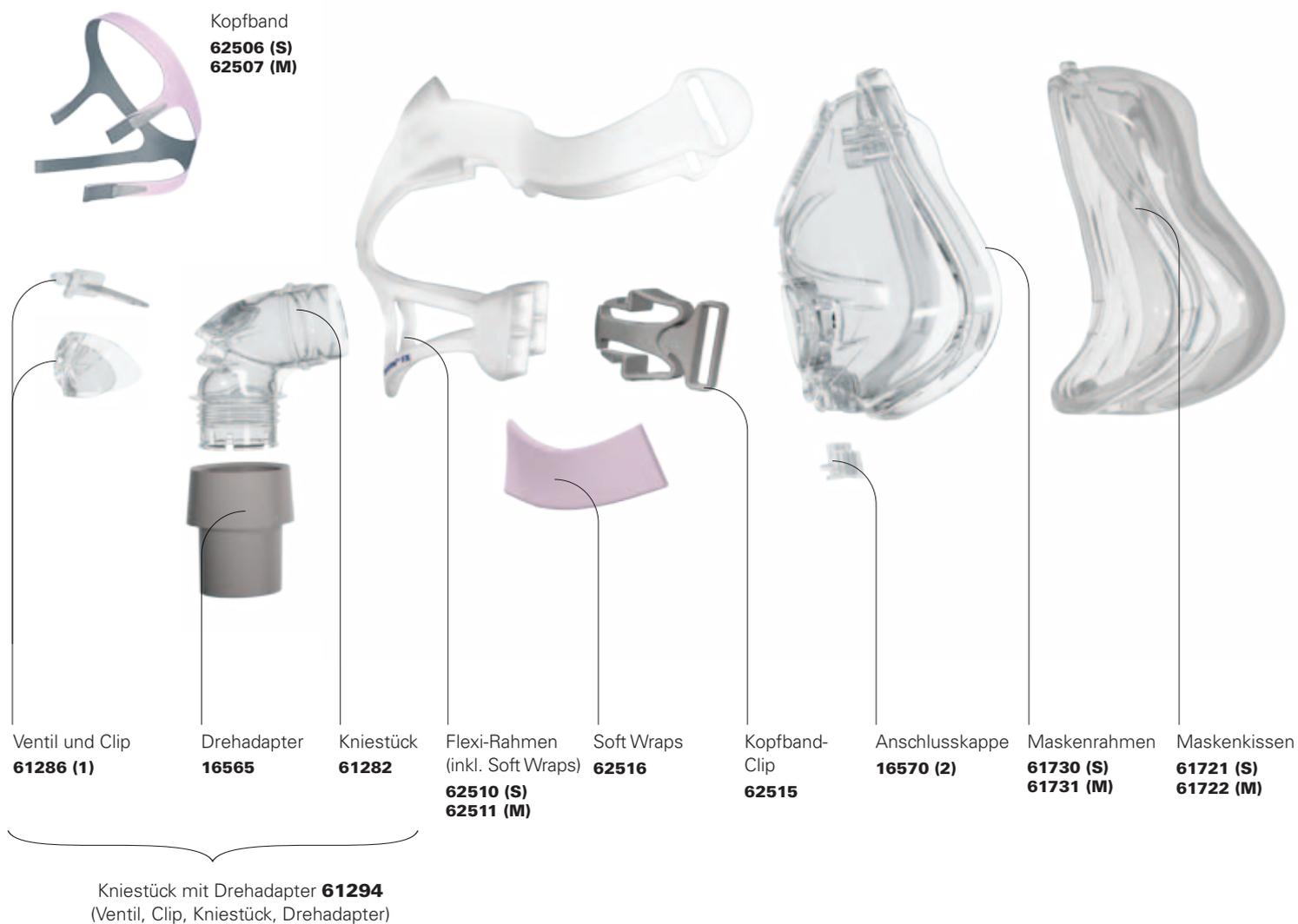

Komplettes System*

Small	62518
Medium	62519

*Medium Kopfband im Lieferumfang erhalten

 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der **Gebrauchsanweisung der Quattro FX for her Full Face Maske.**

Quattro™ FX for Her
 FULL FACE MASKE

Anpassungsleitfaden


Nehmen Sie vor dem Anlegen Ihrer Maske die orangefarbene Rahmenstütze von der Rückseite der Maske ab und bewahren Sie diese für später auf.



- Öffnen Sie beide unteren Kopfbandclips und setzen Sie dann das Maskenkissen von schräg oben auf den Nasenrücken.



- Halten Sie nun den oberen Teil der Maske fest und schwenken Sie den unteren Teil nach unten auf das Gesicht.

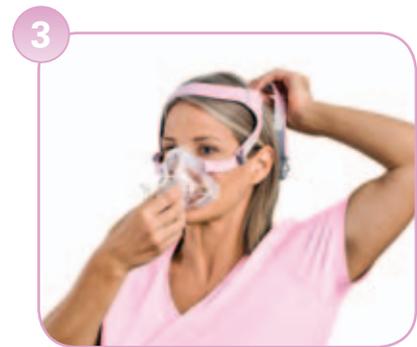

- Halten Sie die Maske vor das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie die unteren Bänder unter den Ohren entlang und befestigen Sie das Kopfband am unteren Teil des Flexi-Rahmens.



- Öffnen Sie die Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und gut sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.



- Wiederholen Sie Schritt 5 mit den unteren Kopfbändern.



- Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches am Drehadapter und das andere Ende am Atemtherapiegerät an.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Tipp 1



- Stellen Sie sicher, dass das Kopfband richtig auf dem Kopf sitzt.



- Das Haar kann zusammengebunden oder offen über oder unter dem Kopfband getragen werden.

Tipp 2



- Stellen Sie sicher, dass die Maske mittig auf dem Nasenrücken sitzt und nicht die Sicht verdeckt.

Quattro™ FX for Her
FULL FACE MASKE

www.quattrofx.com